

## CMT Disinfection wipes - 200 stuks (BE: BE-REG-02430, NL: 14019N) (Lot: 102.877)

### ALGEMEEN



CMT® Disinfection Wipes zijn gebruiksklare alcoholhoudende doekjes met Ethanol en Isopropyl Alcohol. Toegelaten door het CTGB onder 14019N/14317B en kunnen worden gebruikt als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten, schimmels en virussen (omkapselde virussen en niet-omkapselde virussen) op kleine harde oppervlakken en materialen.

De doekjes zijn bestemd voor eenmalig gebruik en kunnen worden toegepast voor het desinfecteren van kleine, harde oppervlakken (max. 0,5 m<sup>2</sup>), die voor het behandelen schoon zijn gemaakt. Het middel alleen toepassen op kleine oppervlakken die alcoholbestendig zijn zoals thermometervoelers, tiptoetsen, telefoons, handgrepen, deurklinken, toiletkranen, toiletbrillen, keyboards, kastgrepen, messen en tangen. CMT® Disinfection Wipes kunnen worden ingezet op oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor.



|                  |      |
|------------------|------|
| pH               | 7,8  |
| Reinigingskracht | Mild |

### GEBRUIK


Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten, schimmels en virussen (omkapselde virussen en niet-omkapselde virussen) op kleine harde oppervlakken en materialen (tot ca. 0,5 m<sup>2</sup>.) in:

- grootkeukens en overige instellingen in de voedingsmiddelen sector
- dierenartsenpraktijken
- wellness sector
- laboratoria
- clean rooms
- ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg

Te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikte reinigingsmiddel goed afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen en het oppervlak drogen met disposable papier. Het te desinfecteren droge oppervlak bevochtigen met de doekjes door al wrijvend enige druk op het doekje uit te oefenen. Zorg ervoor dat de te behandelen oppervlakken gedurende de aangegeven inwerktijd volledig bevochtigd blijven. Voor optimale desinfectie en ter voorkoming van kruisbesmetting, elk doekje slechts 1 keer gebruiken. Na behandeling het oppervlak aan de lucht laten drogen. Alleen vochtige doekjes zijn werkzaam, doekjes na uitdroging niet gebruiken.

**Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. BOMA is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.**

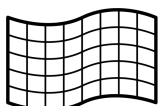

READY TO USE

## CMT Disinfection wipes - 200 stuks (BE: BE-REG-02430, NL: 14019N) (Lot: 102.877)

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

**Afmetingen product (HxØ)** 16 x 8 cm

CMT Disinfection Wipes alcoholhoudende doekjes zijn getest volgens:

- EN 1650:2008
- EN 1276:2009
- Testrapporten op verzoek opvraagbaar

Gevarenaanduidingen:

H228: Ontvlambare vaste stof.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

### LOGISTIEKE GEGEVENS

#### Product

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnr     | 220111        |
| Eenheid       | Pot           |
| Bruto gewicht | 372 g         |
| Netto gewicht | 350 g         |
| EAN-code      | 8716244001759 |

#### Verpakking

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Aantal per verpakking | 12                    |
| Afmetingen            | 34.5 x 17.5 x 26.5 cm |
| Bruto gewicht         | 4676 g                |
| EAN-code              | 8716244001711         |

#### Pallet

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Aantal per pallet       | 768 |
| Aantal lagen per pallet | 8   |
| Aantal per laag         | 96  |

